

RHINO HORN DZBANEK DO PŁUKANIA NOSA

cena: 49,99 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	Yogaprocess A.S.
Wysyłka	do 48 godzin

Opis produktu

Płukanie nosa dzbankiem Rhino Horn to tani i prosty sposób na usunięcie śluzu, kurzu i innych obcych wydzielin z nosa. Użycie dzbanka jest proste w obsłudze i niesie minimalne ryzyko skutków ubocznych.

Niniejszą metodę z powodzeniem stosuje się w zapobieganiu oraz leczeniu zapalenia górnych dróg oddechowych jak i ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.

Płukanie nosa dzbankiem Rhino Horn jest naturalną i w wielu przypadkach stosowaną z powodzeniem alternatywą dla powszechnych kropli i sprayów do nosa.

Działanie:

- * działa zapobiegawczo lub łagodzi przebieg zapalenia zatok przynosowych,
- * zwiększa odporność śluzówek nosa na infekcje bakteryjne i wirusowe,
- * usuwa z nosa kurz i pyłki, tym samym zmniejsza objawy alergii,
- * pomagają po zabiegach chirurgicznych w okolicach nosa,
- * w naturalny sposób odtyka nos podczas zwykłego kataru,
- * pomagają ludziom cierpiącym na dolegliwość syndromu suchej śluzówki,
- * może pomóc kobietom ciężarnym, które w wyniku zmian hormonalnych mają zatkany nos,
- * stymuluje naturalne mechanizmy czyszczenia dróg oddechowych.

Sposób użycia:

1. Jedną miarkę soli uzupełnić wodą

Użyj zwykłej soli kuchennej lub soli morskiej (NaCl), nie należy używać substytutu soli ani soli aromatyzowanej, mieszanej.

Dzbanek należy do pełna wypełnić wodą w temperaturze ciała (ok. 37 °C) i rozpuścić w nim sól. Woda musi być czysta, czyli zdatna do picia.

2. Płukanie nosa

Lekko pochyl głowę do przodu, woda swobodnie przepłynie z jednego nozdrza do drugiego.

3. Wydmuchanie.

Delikatnie wydmuchaj resztki wody z nosa, efektem będzie oczyszczony nos i miłe uczucie.

UWAGI

- * Do płukania nosa stosuje się słoną wodę (0,9% roztworu NaCl, czyli roztwór fizjologiczny) w temperaturze ciała.
- * Korzystanie z dzbanka Rhino Horn nie jest trudne – wystarczy letnia woda oraz zwykła sól kuchenna.
- * Dzbanek Rhino Horn jest zaprojektowany w taki sposób, aby woda swobodnie przepłynęła z jednego nozdrza do drugiego tylko dzięki sile grawitacji.
- * Nos dzbankiem Rhino Horn™ mogą płukać dzieci w wieku od 5 lat pod okiem dorosłej osoby.
- * Po nabyciu praktyki cała czynność zajmuje ok. 1 minuty włącznie z przygotowaniem roztworu.
- * Na stronie www.rhinohorn.pl można obejrzeć film instruktażowy.
- * Szczegółowa instrukcja używania znajduje się wewnątrz opakowania.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.