

Aparat słuchowy HAXE model JH-W5



cena: 319,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	Haxe Polska
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Aparat słuchowy HAXE model JH-W5

Zastosowanie

Aparat słuchowy przeznaczony jest do kompensacji niedosłuchu. Aparat jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz przez pacjentów powyżej 36 miesiąca życia, jeżeli lekarz stwierdził konieczność kompensacji niedosłuchu.

Charakterystyka

Aparat słuchowy to został stworzony dla pacjentów powyżej 36 miesiąca życia z ubytkiem słuchu. Urządzenie wzmacnia dźwięki z otoczenia, redukując przy tym zakłócające je szумы. Aparat JH-W5 to komplet 2 nowoczesnych aparatów dousznych w kolorze białym z szarymi akcentami. Wyglądem przypominają słuchawki i nie wystają poza ucho. Etui będące jednocześnie ładowarką aparatów, chroni je przed upadkiem czy zakurzeniem.

Komfort i uniwersalność

Kształt aparatów oraz 3 rozmiary wkładek usznych, które znajdują się w zestawie, gwarantują, że aparat idealnie dopasowuje się do prawego i lewego ucha. Aparaty są bardzo lekkie, małe a dzięki temu wygodne i komfortowe. Sprawdzą się nie tylko podczas rozmów, oglądania telewizji czy słuchania muzyki, ale również podczas aktywności fizycznych. Aparat douszny to doskonałe rozwiązanie dla pacjentów noszących okulary korekcyjne lub słoneczne. Łatwa obsługa sprawia, że nadają się dla osób w każdym wieku (pow. 36 miesiąca życia)

Etui 2w1

W zestawie znajduje się etui, które nie tylko służy do przechowywania aparatów słuchowych, ale również pełni funkcję stacji do ładowania. Zostało ono wyposażone w akumulator, dzięki czemu aparaty można ładować nawet poza domem. Dodatkowo zabezpiecza produkt przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i wilgocią. Etui ładowane jest za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu.

Dwie słuchawki

W zestawie znajdują się dwa niezależne od siebie aparaty słuchowe, umożliwia to korzystanie z jednego lub obu aparatów jednocześnie. W przypadku gdy problem niedosłuchu występuje zarówno w prawym, jak i lewym uchu, zalecane jest używanie obu słuchawek. Przywrócenie słuchu w obu uszach pozwala na dokładne słyszenie oraz umiejscowienie dźwięków w przestrzeni. To niezwykle istotne np. w sytuacji zagrożenia, zlokalizowanie źródła dźwięku umożliwia szybką reakcję.

Prosty w obsłudze

Aparat słuchowy JH-W5 zawiera tylko pokrętło głośności. Kiedy aparat znajduje się poza etui, to jest w trybie czuwania i uruchamia się automatycznie po 3 sekundach od prawidłowego umieszczenia w uchu. Płynna regulacja głośności pozwala idealnie dopasować poziom wzmocnienia dźwięku. Diody LED na etui wskazują poziom naładowania każdego z aparatów oraz samego etui.

W zestawie:

2 x Aparat słuchowy
1 x Etui ładujące
6 x Wkładki uszne (różne rozmiary)
1 x Akcesoria do czyszczenia
1 x Kabel USB
1 x Instrukcja używania wraz z kartą gwarancyjną

Przeciwwskazania:

- Atrezja wrodzona ucha zewnętrznego lub deformacja zewnętrznego przewodu słuchowego, duża ilość ciał obcych w zewnętrznym przewodzie słuchowym.
- Głuchota jest niestabilna, a stopień utraty słuchu często waha się.
- Skargi na ból głowy, zawroty, ból ucha, szumy uszne i inne objawy, które nie nadają się do adaptacji.
- Nagła głuchota w ciągu ostatnich trzech miesięcy; szybko postępująca głuchota; jednostronna głuchota lub inna ostra choroba ucha.
- Wysiłek w uchu środkowym i częste zapalenia.
- Niedosłuch centralny; niedosłuch nieorganiczny.
- Pacjenci z ostrym zapaleniem ucha zewnętrznego i zapaleniem błony bębenkowej.
- Pacjenci z ostrym i przewlekłym ropnym zapaleniem ucha środkowego (w okresie infekcji ropnej).
- Pacjenci uczuleni na materiał, z którego wykonano produkt.

Czas ładowania

Aparaty: 2 godziny
Etui: 2 godziny

Czas pracy

12 godzin

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Haxe Polska
Hebanowa 11
63-400 Ostrów Wielkopolski

Galeria

