

ASPIRATOR KATARU KATAREK TRAVEL 2W1

cena: 54,00 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	Duna Sp. z o.o
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Zastosowanie:

Urządzenie służy do usuwania wydzieliny z nosa u dzieci. Nie stosować do innych celów.

Sposób użycia:

Aspirator podłączony do odkurzacza:

połącz komorę z końcówką, wąski koniec aspiratora włóż do łącznika, a jego stożkowy koniec włóż do rury ssącej odkurzacza, weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana, końcówkę aspiratora przyłóż do otworu nosowego na kilka sekund i odciągaj wydzielinę, czynność powtórz na drugiej dziurce, wyłącz odkurzacz i wyczyść aspirator zgodnie ze wskazówkami.

Aspirator ustny:

połącz komorę z końcówką, a do łącznika włóż ustnik, weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana, końcówkę aspiratora przyłóż do otworu nosowego, ustnik włóż do ust i odciągaj wydzielinę, czynność powtórz na drugiej dziurce, po oczyszczeniu noska wyczyść aspirator zgodnie ze wskazówkami.

W zestawie Katerek Travel 2w1 znajduje się:

aspirator kataru z rozkręcaną komorą i szczoteczkę
2 końcówki do noska
Kończówkę do odkurzacza

Końcówkę do aspiracji ustnej
Kosmetyczkę podróżną – opakowanie

Ważne informacje:

Pierwsze użycie:

Przed użyciem dokładnie opłucz urządzenie gorącą wodą. Nie mocz w detergencie!

Czyszczenie:

Wyczyść urządzenie po każdym użyciu. Natychmiast umyj go w ciepłej wodzie z kranu z detergentem przyjaznym dla dziecka. Opłucz gorącą lub ciepłą wodą. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię aspiratora miękką ściereczką lub wacikami nasączonymi alkoholem etylowym klasy farmaceutycznej.

Nie używaj żadnych innych detergentów, środków chemicznych ani materiałów ściernych.

Ostrzeżenie:

W przypadku hemofilii lub częstego krwawienia z nosa należy poprosić o poradę medyczną. Jeśli po użyciu w okolicach noska dziecka zauważysz alergiczną wysypkę lub zaczerwienienie, przestań korzystać z urządzenia. Poproś o pomoc medyczną.

Uwaga:

Gdy jest stosowany u kilku dzieci, zaleca się stosowanie osobnych końcówek dla każdego dziecka i przechowywanie ich podpisanych. Jeśli nie jest to możliwe, dokładnie wyczyść końcówkę przed każdym użyciem, tak jak opisano powyżej.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Dystrybutor:

Duna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13/1,
30-701 Kraków