

Body Clock SensaTONE na nietrzymanie moczu dla kobiet



cena: 279,00 PLN

Opis słownikowy

Producent	Body Clock
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

SensaTONE jest prostym, a zarazem niezwykle skutecznym, elektronicznym Stymulatorem Mięśni Przepony Miednicznej (SMPM). Jest niewielki, stylowy i zaprojektowany z myślą o wzmacnianiu mięśni przepony miednicznej u kobiet w każdym wieku.

SensaTONE pomaga wzmocnić mięśnie przepony miednicznej. Tak jak w przypadku pozostałych mięśni w ciele człowieka - im więcej się je stymuluje tym silniejszymi się stają. Silne mięśnie przepony miednicznej bardzo pozytywnie wpływają na kontrolę nad pęcherzem, na estetyczny wygląd miejsc intymnych oraz na zwiększenie przyjemności płynących ze stosunków seksualnych.

Przepona miednicy zbudowana jest z wielowarstwowej powłoki mięśniowej, która podpira narządy wewnętrzne jednocześnie wspomagając funkcje macicy, pęcherza i jelita. Mięśnie przepony utrzymują otwory cewki moczowej, pochwy i odbytnicy w stanie ich zamknięcia. W niektórych sytuacjach mięśnie te muszą się rozluźnić jednocześnie otwierając te otwory (np. by umożliwić wypróżnienie pęcherza, czy poszerzyć pochwę w czasie stosunków seksualnych czy podczas porodu). Z czasem funkcje podtrzymywania, wspierania i zamykania słabną.

Wyróżnia się trzy rodzaje nietrzymania moczu

- Inkontynencja parcia – objawia się silnym, nagłym i niepohamowanym uczuciem potrzeby oddania moczu.
- Inkontynencja stresowa – objawia się podczas kichania, kaszlu, śmiechu, podnoszenia albo podczas ćwiczeń i powoduje wyciek niewielkiej ilości moczu.
- Inkontynencja mieszana - kombinacja inkontynencji parcia i stresowej, występuje podczas kichania, kaszlu, śmiechu.

Jak szybko pojawią się efekty stosowania SensaTONE

Efekty widać u każdego po innym okresie czasu. Zależy to między innymi od typu inkontynencji którego dotyczy kuracja:

- Inkontynencja stresowa – poprawa pojawia się wolno, wraz z budową tkanki mięśniowej i wrażliwości nerwów. Może trwać do 2 miesięcy.
- Inkontynencja parcia – poprawa pojawia się poprzez ograniczenie fałszywych sygnałów wysyłanych przez pęcherz do mózgu.

Efekty można zobaczyć już po 14 dniach.

- Inkontynencja mieszana – poprawa pojawia się wraz z budową tkanki mięśniowej i wrażliwości nerwów oraz poprzez ograniczenie fałszywych sygnałów wysyłanych przez pęcherz do mózgu. Może to potrwać dłużej, ale pierwsze efekty powinny być zauważalne już po 21 dniach.

KIEDY NIE MOŻNA UŻYWAĆ SensaTONE

- Nie używaj SensaTONE gdy masz rozrusznik serca.
- Jeżeli cierpisz na epilepsję, choroby serca, masz metalowe implanty lub cierpisz na ból niewiadomego pochodzenia - skonsultuj się z lekarzem o możliwość stosowania urządzenia.
- Nie używaj jeśli masz infekcje odbytu lub zakażenie układu moczowego.
- Nie używaj do uśmierzania bólu niewiadomego pochodzenia, który może wymagać nagłego leczenia.

UŻYWANIE SensaTONE DO SMPM

- Włącz urządzenie za pomocą przycisku „Włącznik / wyłącznik”. SensaTONE zawsze uruchamia się w Module Pracy A
- SensaTONE ma cztery moduły pracy, każdy z nich pomocny przy jednym z typów inkontynencji (problemów z nietrzymaniem moczu):

Moduł A – Inkontynencja parcia (Urge Incontinence)
Moduł B – Inkontynencja stresowa (Stress Incontinence)
Moduł C – Inkontynencja mieszana (Mixed Incontinence)
Moduł D – Pielęgnacja pochorobowa (After care)

- Wybierz moduł najodpowiedniejszy dla Twojego typu inkontynencji przyciskając przycisk zmiany modułu pracy.
- Następnie rozpocznij stymulację naciskając przycisk zwiększenia intensywności impulsów. Za każdym razem gdy naciśniesz ten przycisk zwiększy się poziom intensywności impulsów wyświetlany na ekraniku.
- Powoli zwiększaj intensywność impulsów aż poczujesz skurcze mięśni. -
- Jeśli uważasz że uczucie jest zbyt mocne po prostu zmniejsz intensywność przyciskiem zmniejszenia intensywności impulsów.
- Moduły A, B i C mają ustalone czasy trwania. SensaTONE wyłączy się automatycznie po zakończeniu wybranego programu. Moduł D nie ma ustalonego czasu trwania.
- Po użyciu, upewnij się że SensaTONE jest wyłączony. Następnie wyjmij sondę SensaTONE ze swojego ciała, odłącz przewody a następnie umyj sondę zgodnie z instrukcjami.

OPAKOWANIE ZAWIERA:

1 x urządzenie SensaTONE
1 x sonda ANUFORM
1 x przewód elektryczny
1 x saszetka żelu nawilżającego
2 x bateria AAA
1 x torebka z miękkiego materiału do przenoszenia urządzenia
1 x smycz

Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu na urządzenie. Akcesoria takie jak kable, sondy czy elektrody są częściami roboczymi urządzeń, konieczność okresowej wymiany w miarę użytkowania jest zjawiskiem normalnym. Gwarancja na akcesoria wynosi 3 miesiące od daty

zakupu.