

## DIATHER TEST ALERGIA pies kot

cena: 45,90 PLN



### Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

## TEST ALERGIA pies kot

1 test domowy do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgE swoistych wobec alergenów sierści psa i kota

### ZASTOSOWANIE

Alergia jest chorobą występującą w 20-25% przypadków w formie nadwrażliwości typu natychmiastowego z objawami w postaci nieżyty nosa, pokrzywki, atopowego zapalenia skóry, dolegliwości żołądkowo-jelitowych, duszności i rzadziej wstrząsu anafilaktycznego.

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

TEST ALERGIA pies kot jest szybkim testem przeznaczonym do jakościowego wykrywania we krwi przeciwciał klasy IgE (sIgE) swoistych wobec alergenów sierści psa i kota. Po uwzględnieniu objawów klinicznych test może służyć do oceny, czy występujące symptomy alergii są spowodowane nadwrażliwością typu 1.

Uzyskany w badaniu wynik testu jest poddany wizualnej interpretacji na podstawie zmiany barwy w polach testowych kasety, które zawierają immobilizowaną streptawidynę. Membrana kasety testowej zawiera przeciwciała sprzężone ze złotem koloidalnym skierowane przeciwko przeciwciałom klasy IgE osoby badanej. Ponadto w studzienkach S kasety testowej zaadsorbowane są biotynylowane alergeny kota i psa.

### WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

TEST ALERGIA pies kot jest przeznaczony dla osób z podejrzeniem alergii (świąt luz zaczerwienienie skóry, powtarzające się łzawienie oczu i kichanie), zwłaszcza jeśli atopia dotyka najbliższej rodziny.

U ponad 20% pacjentów z rozpoznaną alergią występują objawy kliniczne; osoby te narażone są na częste ataki astmy lub inne

powikłania.

## STRESZCZENIE

Witamina D należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jest ona odpowiedzialna za prawidłową gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. Witamina D3 jest naturalnie produkowana w ludzkiej skórze w wyniku ekspozycji na światło, a witamina D2 jest pozyskiwana głównie z pożywienia lub suplementacji. Witamina D jest transportowana do wątroby, gdzie jest magazynowana w postaci 25-hydroksywitaminy D - 25(OH)D. Niedobór uznawany jest za częsty problem zdrowotny naszego społeczeństwa, który jest przyczyną wielu poważnych chorób: osteoporozy, chorób nowotworowych, układu krążenia, o podłożu autoimmunologicznym, cukrzycy czy depresji.

## OPAKOWANIE ZAWIERA

- 1x kasetka testowa,
- 1x pipeta plastikowa,
- 1x fiolka z zakraplaczem zawierająca bufor o objętości wymaganej do wykonania 1 testu,
- 1x sterylny nakłuwacz do pobieranie próbki krwi
- 1x instrukcja użycia

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

### KTO POWINIEN WYKONAĆ TEST?

TEST ALERGIA pies kot jest przeznaczony dla osób z podejrzeniem alergii (świąd lub zaczerwienienie skóry, powtarzające się łzawieniem oczu i kichanie), zwłaszcza jeśli atopia dotyka najbliższej rodziny.

U ponad 20% pacjentów z rozpoznaną alergią występują objawy kliniczne, osoby te narażone są na częste ataki astmy lub inne powikłania.

### CO OZNACZA WYNIK NEGATYWNY?

Wynik negatywny testu oznacza, że stężenie przeciwciał klasy IgE obecnych we krwi jest niższe od stężenia progowego. W przypadku utrzymujących się objawów należy zgłosić się do lekarza.

### CO OZNACZA WYNIK POZYTYWNY?

Wynik pozytywny testu oznacza że stężenie przeciwciał klasy IgE obecnych we krwi jest wyższe od stężenia progowego. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zlecić wykonanie innych badań.

### JAKA JEST DOKŁADNOŚĆ TESTU?

Dokładność testu (alergeny kota / E1 kot) wynosi 98%.

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Podmiot odpowiedzialny:


DIATHER sp. z o.o sp.k.  
Twarda 1/14  
00-114 Warszawa

## Galeria

### Zawartość zestawu



### Schemat użycia

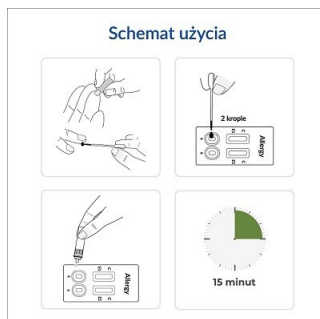

### Interpretacja wyników

