

DIATHER TEST NARKO THC mocz

cena: 9,75 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

TEST NARKO THC mocz

to jednorazowy, domowy test paskowy (1 szt) do wykrywania obecności narkotyków w moczu. Test wykrywa obecność THC (marihuana, haszysz).

ZASTOSOWANIE

TEST NARKO THC mocz to prosty w wykonaniu test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania narkotyków w moczu. Zasada działania polega na zanurzeniu paska testowego w próbce moczu, a następnie odczytaniu wyniku po 5 minutach.

CHARAKTERYSTYKA

THC (tetrahydrokannabinol) to główny składnik psychoaktywny marihuany i haszyszu. Marihuana jest suszem kwiatostanów konopi indyjskich, haszysz natomiast to żywica konopi. Marihuana przyjmowana jest poprzez palenie, wdychanie naparów wodnych lub spożywanie z potrawami.

Wywołuje euforie, odprężenie, wielomówność, wzrost łaknienia, napadów śmiechu, wzrost ciśnienia krwi a następnie spadek aktywności i apatię,

WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

Szybki test paskowy TEST NARKO THC mocz jest testem przeznaczonym do jakościowego wykrywania THC w moczu występującym w stężeniu granicznym 50 ng/ ml. Działanie THC utrzymuje się przez ok. 2 godziny po wypaleniu pojedynczego papierosa z marihuana, obecność substancji w organizmie można stwierdzić od 3 do 10 dni po jej zażyciu.

OPAKOWANIE ZAWIERA

- 1 saszetka z testem paskowym,
- Instrukcja obsługi,

INTERPRETACJA WYNIKÓW

WYNIK NEGATYWNY

W badanym moczu nie stwierdzono obecności narkotyków, gdy w polu testowym pojawiają się dwa barwne prążki – w strefie testowej T i w strefie kontrolnej C. Wynik negatywny oznacza, że stężenie narkotyku w moczu jest niższe od poziomu wykrywalności testu.

WYNIK POZYTYWNY

W badanym moczu stwierdzono obecność narkotyków, gdy w polu kontrolnym C pojawi się jedna barwna linia. Wynik pozytywny oznacza, że stężenie narkotyków w moczu jest wyższe od poziomu wykrywalności testu.

WYNIK NIEWAŻNY

Brak reakcji lub wystąpienie wyłącznie paska testowego T świadczy o nieważności wyniku badania. W takiej sytuacji należy powtórzyć badanie z wykorzystaniem nowego zestawu diagnostycznego.

Ostrzeżenie


To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:


DIATHER sp. z o.o sp.k.
Twarda 1/14
00-114 Warszawa

Galeria

Zawartość zestawu

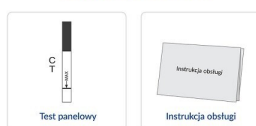

Schemat użycia

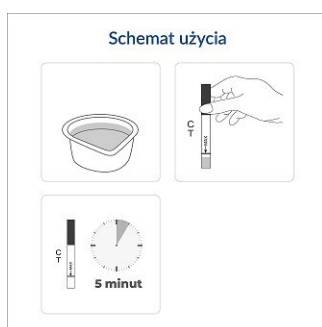

Interpretacja wyników

Wynik negatywny



Wynik pozytywny



Wynik nieważny

