

# DIATHER TEST NIETOLERANCJA GLUTEN+CELIAKIA

cena: 36,99 PLN



## Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	1-2 dni

## Opis produktu

**Test nietolerancja glutenu + celiakia (1 test)** domowy, kasetkowy test immunochromatograficzny przeznaczony do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynom (DGP).

### ZASTOSOWANIE

Szybki test, przeznaczony do wykrywania we krwi i surowicy przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (tTG), która jest głównym autoantygenem rozpoznawanym przez przeciwciała skierowane przeciwko endomysium mięśni gładkich oraz przeciwciał skierowanych przeciwko i gliadynom (DGP).

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Test nietolerancja glutenu + celiakia jest przeznaczony do wykrywania we krwi i surowicy przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (tTG), która jest głównym autoantygenem rozpoznawanym przez przeciwciała skierowane przeciwko endomysium mięśni gładkich oraz przeciwciał skierowanych przeciwko i gliadynom (DGP). W trakcie badania obecne we krwi przeciwciała klasy IgA (przeciwko tTG lub przeciwko gliadynie) połączą się z barwnymi cząsteczkami lateksu, opłaszczonymi przeciwciałami przeciwko przeciwciałom klasy IgA. Powstające koniugaty zbudowane z cząsteczek lateksu połączonych z przeciwciałami skierowanymi przeciwko IgA i z przeciwciałami klasy IgA, migrują wzdłuż membrany, zgodnie z siłami kapilarnymi do odpowiednich pól testowych (odpowiednio w polach T1 T2) znajdują się rekombinowane tTG i deaminowane peptydy gliadyny. Cząsteczki te wychwytyją koniugaty lateksowe utworzone w oparciu o obecne w próbce przeciwciała klasy IgA, skierowane przeciwko tTG i/lub przeciwko gliadynie w wyniku czego pojawiają się odpowiednie czerwone linie. Wyniki testu są interpretowane na podstawie obecności odpowiednich linii po 15 minutach.

### WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

- wzdęcia i ból brzucha
- przewlekła biegunka
- wymioty
- zaparcia
- dla osób, które w najbliższej rodzinie mają krewnych z nietolerancją glutenu lub celiakią
- osoby z cukrzycą typu 1

#### OPAKOWANIE ZAWIERA

1x kasetka testowa, 1x pipeta plastikowa, 1x fiolka z buforem, 1x sterylny nakłuwacz do pobierania próbki krwi, instrukcja użycia.

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI

##### KTO POWINIEN WYKONAĆ TEST?

TEST NIETOLERANCJA GLUTENU+CELIAKIA jest przeznaczony dla osób z objawami takimi jak wzdęcia i ból brzucha, przewlekła biegunka, wymioty, zaparcia; dla osób, które w najbliższej rodzinie mają krewnych z nietolerancją glutenu lub celiakią, dla osób z cukrzycą typu 1. Test jest przydatny dla osób chorych na celiakię w celu monitorowania prawidłowości diety (w takim przypadku wyniki powinny być negatywne).

##### CO OZNACZA WYNIK NEGATYWNY?

Wynik negatywny testu oznacza brak nietolerancji glutenu. Nie jest wymagane podejmowanie żadnych działań.

##### CO OZNACZA WYNIK POZYTYWNY?

Wynik pozytywny testu oznacza podejrzenie nietolerancji glutenu. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zlecić wykonanie dodatkowych badań.

##### JAKA JEST DOKŁADNOŚĆ TESTU?

Dokładność testu (tTG: transglutaminaza tkankowa) wynosi 98%.  
Dokładność testu (DGP: deaminowane peptydy gliadyny) wynosi 98%.

#### Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### Podmiot odpowiedzialny:


DIATHER sp. z o.o sp.k.  
Twarda 1/14  
00-114 Warszawa

## Galeria

### Zawartość zestawu



### Schemat użycia

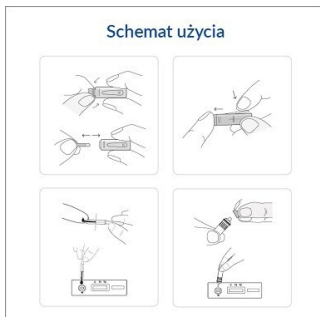

### Interpretacja wyników

