

## FEMILA rozszerzacze pochwy z uchwytem 5 sztuk



cena: 239,00 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	Amed
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

**FEMILA Silikonowe rozszerzacze pochwy z uchwytem** przeznaczone są do samodzielnych ćwiczeń mających na celu rozszerzenie ścian pochwy, tak, aby stosunek płciowy lub badanie ginekologiczne mogły (ponownie) odbywać się bezboleśnie.

#### Zalety:

100% wodoodporne  
5 rozmiarów dostosowanych do potrzeb  
wygodny uchwyt  
hipoalergiczne

#### Wskazania do stosowania:

dyspareunia (nawracający lub stały ból w obrębie narządów płciowych podczas stosunku płciowego; ból podczas seksu)  
pochwica (skurcze mięśni pochwy)  
zbliznowacenie po nacięciu krocza (epistomia) lub po pęknięciu krocza po operacjach ginekologicznych  
w czasie i po radioterapii / chemioterapii  
po operacjach pochwy ze zmniejszeniem pochwy i zbliznowaceniem  
liszaj twardzinowy i zanikowy sromu  
plastyka pochwy/sztuczna pochwa (np. w przypadku operacji zmiany płci)  
zwężenie pochwy (dziewictwo) opisywane przez pacjentki jako zaburzenie seksualne

**Rozszerzacze pochwy FEMILA to zestaw składający się z 5 dilatorów pochwy (wykonanych z silikonu medycznego), każdy dilator ma inny rozmiar:**

nr 1 średnica 13 mm, długość 110 mm  
nr 2 średnica 18 mm, długość 127 mm  
nr 3 średnica 21 mm, długość 145 mm  
nr 4 średnica 25 mm, długość 175 mm  
nr 5 średnica 32 mm, długość 195 mm

Każdy zestaw zawiera:

5 rozszerzaczy pochwy FEMILA z uchwytem  
szczegółową instrukcję użycia w j. polskim i j. angielskim

#### **Materiał:**

hipoalergiczny silikon

#### **Skrócona instrukcja użycia:**

Przed użyciem należy zwilżyć przedsionek pochwy i rozszerzacz lubrykantem.

Ćwiczenia rozpoczyna się od wprowadzenia do pochwy najmniejszego rozszerzacza, który pozostawia się w pochwie na kilka minut. Jeśli wprowadzanie rozszerzacza w danym rozmiarze jest możliwe bez bólu, oznacza to, że pochwa rozciągnęła się w takim stopniu, że można użyć o rozmiar większego rozszerzacza.

Ćwiczenia należy wykonywać w pozycji siedzącej lub leżącej w zależności od preferencji pacjentki.

Ćwiczenia rozciągające należy wykonywać codziennie, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Jeśli możliwe jest bezbolesne wprowadzanie największego rozszerzacza, można rozważyć odbycie stosunku płciowego.

#### **Czyszczenie:**

Rozszerzacze pochwy FEMILA są przeznaczone do użycia przez jedną pacjentkę.

Po użyciu należy umyć rozszerzacze ciepłą wodą z łagodnym mydłem oraz osuszyć.

#### **Ostrzeżenie**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Galeria

---

