

## Inhalator SANITY Simple (smart & easy)

cena: 124,00 PLN



### Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	Albert Polska
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

#### Inhalator SANITY Simple

Inhalator SIMPLE Sanity to proste w użyciu, kompaktowe urządzenie przeznaczone do terapii inhalacyjnej dla całej rodziny. Umożliwia szybkie podawanie leku w formie mgiełki przy infekcjach i chorobach układu oddechowego.

Inhalator jest prosty w użyciu, ma też kompaktowe rozmiary, co przekłada się na wygodę jego stosowania zarówno na co dzień, jak też podczas leczenia przeziębienia i infekcji.

#### Dane techniczne:

Inhalator smart&easy. Kompresor tłokowy z systemem nebulizacji aerozolowej.

Klasyfikacja (mdd93/42/eec): urządzenie medyczne klasy IIa

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Zużycie energii: 170 VA

Maks. ciśnienie: 250 kPa (2,5 bar)

Maks. przepływ powietrza: 14 l/min

Ciśnienie robocze: 110 kPa (1,10 bar)

Roboczy przepływ powietrza: 4,8 l/min przy 110 kPa

Średnia wydajność nebulizacji: 0,35 ml/min (przy 4 ml roztworu 0,9%NaCl)

Mmad: 2,44 µm

Gsd: 2,87

Waga: 1,45 kg

Wymiary: 130 (dł.) x 89 (wys.) x 146 (gł.) mm

Poziomy hałas: 60 dB (A)

Minimalna pojemność nebulizatora: 2 ml

## Instrukcja użytkowania:

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni w taki sposób, aby nie zablokować otworów wentylacyjnych na bokach urządzenia.

1. Wyjąć kabel zasilający i włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego. Zaleca się rozwinąć całą długość kabla zasilającego, aby uniknąć niebezpiecznego przegrzewania. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony i musi zostać wymieniony, należy skontaktować się z BOK dystrybutora i/lub producentem.
2. Otworzyć nebulizator, odkręcając pokrywkę.
3. Nalać lekarstwo przepisane przez lekarza do nebulizatora.
4. Zamknąć nebulizator, dokręcając pokrywkę.
5. Podłączyć rurkę do wylotu powietrza.
6. Podłączyć drugi koniec rurki do złącza w dolnej części nebulizatora.
7. Podłączyć do nebulizatora odpowiednie akcesorium (maska dla dzieci, maska dla dorosłych, ustnik, element do nosa).
8. Sprawdzić, czy filtr powietrza jest zamontowany.
9. Włączyć inhalator (położenie „I”), aby rozpocząć nebulizację.
10. Po zakończeniu nebulizacji wyłączyć inhalator (położenie „0”) i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
11. Oczyszczyć nebulizator i jego akcesoria w sposób podany w instrukcji czyszczenia.
12. Umieścić akcesoria w torbie lub pudełku.

Nebulizator powinien być podczas użytkowania skierowany do góry, tak aby nie dopuścić do wydostania się substancji i/lub lekarstw z nebulizatora podczas użycia.

## Zawartość opakowania:

Kompresor tłokowy  
Nebulizator HI-FLO Jet  
Maska inhalacyjna dla dorosłych  
Maska inhalacyjna dla dzieci  
Ustnik  
Rurka powietrzna (dł. 2 m)  
2 filtry  
Końcówka do nosa  
Kabel zasilający (dł. 1,5m)  
Torba na inhalator

### Dystrybutor:

Albert Polska Sp. z o.o  
ul. Obwodowa 4A  
32-410 Dobczyce

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.