


## Jasnum Sensi żel intymny, 50ml

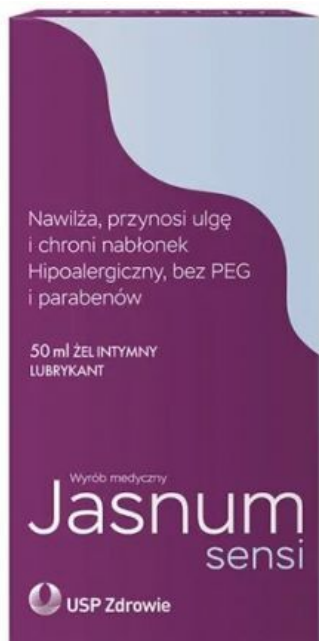

cena: 41,00 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	USP Zdrowie Sp. z o.o.
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

**Jasnum Sensi żel intymny** wyrób medyczny zapewniający dodatkowe nawilżenie okolic intymnych podczas stosunków płciowych i badań ginekologicznych. Nawilża, łagodzi i chroni nabłonek.

Produkt może być stosowany jednocześnie z prezerwatywami lateksowymi, poliuretanowymi i poliizoprenowymi. Żel nie zawiera parabenów, detergentów, substancji zapachowych. Nie brudzi bielizny i jest produktem wegańskim.

#### Sposób użycia:

Przed użyciem należy dokładnie umyć ręce, żel nałożyć na miejsce narażone na otarcia (przed planowanym stosunkiem lub badaniem ginekologicznym).

Przed użyciem należy przeczytać informacje na temat stosowania dołączone do opakowania wyrobu.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować wyrobu podczas okresu.

Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może zmniejszać lub opóźniać ich działanie.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

**Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego:**

Żel może wpływać na ruch plemników i zmniejszać zdolność do zapłodnienia.

**Uwagi:**

Żel Jasnum Sensi nie jest środkiem antykoncepcyjnym.  
Nie zawiera w swoim składzie substancji plemnikobójczych.

**Ciąża i karmienie piersią:**

Kobiety w ciąży i karmiące piersią, przed zastosowaniem wyrobu powinny skonsultować się z lekarzem.

**Skład:**

Glicerol, kwas cytrynowy, hydroksyetyloceluloza, fenyloetanol, glikol kaprylowy, woda oczyszczona.

**Producent:**

USP Zdrowie Sp. z o.o.  
ul. Poleczki 35,  
02-822 Warszawa

**Ostrzeżenie**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.