

Lampa lecznicza Sollux

cena: 162,00 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	Reiher GmbH
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Lampa Sollux przeznaczona jest do użytku domowego. Działanie światła podczerwonego pobudza procesy zdrowienia. Promieniowanie podczerwone dostaje się głęboko pod skórę, dzięki czemu pobudzony zostaje układ krwionośny.

Zastosowanie lampy Sollux:

- REUMATYZM, BÓLE MIĘŚNIOWE, ZAPALENIE KORZONKÓW: zaleca się naświetlanie bolących miejsc, aż do ustąpienia objawów.
- KATAR, PRZEZIĘBIENIA, GRYPA, ANGINA: naświetlanie twarzy, szyi i klatki piersiowej przyspiesza proces wyleczenia oraz hamuje rozwój choroby.
- ZATOKI: leczenie zatok czołowych i obocznych nosa; zaleca się konsultację z lekarzem laryngologiem.
- TRĄDZIK, WRZODY: naświetlania, również ze stosowaniem innych środków dają dobre rezultaty przy większości odmian trądzika.
- SINIAKI, RANY, STŁUCZENIA: naświetlania rozpoczynamy w 12 godzin po wypadku.
- ODMROŻENIA, PRZEMARZNIĘCIA: szczególnie w okresie jesienno-zimowym lampa Sollux jest przydatna w szybkim usunięciu objawów, związanych z nieprzychylną aurą.
- KOSMETYKA LECZNICZA I UPIĘKSZAJĄCA: ciepło rozszerza naczynia krwionośne, otwiera pory skóry (cery), w rezultacie każda nałożona maseczka, maść czy krem są pełniej i szybciej wchłaniane.
- UKŁUCIA OWADÓW: naświetlanie zmniejsza ból, swędzenie oraz napięcie skóry.
- ŁYSIENIE: dobre efekty daje naświetlanie przy łysieniu przejściowym, łącznie z masażem.

Dane techniczne:

Zastosowano lampę promieniowania podczerwonego Philips IR95, o mocy 100 W i średnicy kolby 95 mm. Napięcie sieciowe 220-240 V.

Instrukcja użytkowania:

czas i częstotliwość użytkowania - zaleca się dwa, trzy razy dziennie, jednak nie dłużej niż 15 minut jednorazowo, odległość od lampy powinna wynosić od 30 do 80 cm

Ważne informacje:

Naświetlania Lampą Sollux domowego użytku nie wymagają stosowania okularów ochronnych.

Podczas naświetlania usunąć z otoczenia przedmioty łatwopalne, wrażliwe na ciepło oraz zamknąć oczy, po pracy lampa jest gorąca! Chronić przed wilgocią!
Do czyszczenia lampy nie używać środków chemicznych.

Producent:

Reiher GmbH/Niemcy

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.