

LIVER-Screen - test na wątrobę

cena: 37,90 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	LabHome
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Test LIVER-Screen służy do diagnostyki znacznego uszkodzenia wątroby. Test wykrywa w krwi **znacznie podwyższony poziom transaminaz ALT i AST**. Transaminazy (aminotransferazy) pojawiają się w krwi w zwiększonej ilości w odpowiedzi na uszkodzenie komórek wątroby. Liver-Screen - test na wątrobę pozwala na sprawdzenie, czy leki, alkohol lub nadwaga nie wpływają negatywnie na stan wątroby. Domowy test wątrobowy wykrywa znacznie podwyższony poziom transaminaz ALT i AST (powyżej 80 IU/L) w krwi uzyskanej z nakłucia palca. Test pozwala na szybką diagnostykę w zaledwie 10 minut i wykazuje się wiarygodnością zbliżoną do testów laboratoryjnych.

Działanie

W przypadku uszkodzenia komórek wątroby enzymy ALT i AST są uwalniane przez wątrobę do krwiobiegu. Wyrób medyczny LIVER-Screen® wykrywa enzymy dzięki specyficznym odczynnikom immunologicznym. Nieprawidłowe stężenia transaminaz ALT lub/i AST są widoczne jako jedna lub dwie czerwone linie w oknie testowym.

Zastosowanie

Choroby wątroby nawet w 40% przypadków mogą przebiegać bezobjawowo. Uszkodzenie komórek wątroby może być związane z infekcją wirusową, przyjmowaniem leków, chorobami układu krążenia i cukrzycą, niealkoholowym stłuszczeniem wątroby lub chorobą autoimmunologiczną. Z powodu nadużywania alkoholu na marskości wątroby rocznie na świecie umiera 1 mln osób.

Skład zestawu

Profesjonalny nakłuwacz (1szt.), płytka testowa (1szt.), pipeta plastikowa (1szt.), specjalny diluent do rozcieńczenia próbki krwi (1szt.), szaszetka pochłaniająca wilgoć (1szt.).

Domowe próby wątrobowe - wskazania do wykonania testu

Wykonanie testu Liver Screen Test jest wskazane, kiedy obserwujemy dolegliwości, które mogą być **objawami chorej wątroby**:

- przewlekłe zmęczenie,
- bóle mięśni,

- osłabienie,
- żółtaczka,
- utrata apetytu,
- ból brzucha,
- ciemny mocz,
- jasny kolor kału,
- obrzmienie brzucha,
- świąd skóry.

Jeśli zauważyłeś którykolwiek z objawów lub jesteś jedną z osób znajdujących się w grupie ryzyka:

- osoby chorujące na cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze,
- osoby przyjmujące leki, środki dopingowe, spożywających alkohol,
- osoby narażone na kontakt z krwią i zarażenie wirusami

koniecznie wykonaj kontrolnie testy wątrobowe Liver Screen!

Jak odczytać wynik testu?

Testy wątrobowe wynik negatywny:

Wynik negatywny testu oznacza, że stężenie obydwu transaminaz mieści się w przyjętej normie (80 IU/L) – na wyniku badania widoczna jest jedna niebieska linia w polu kontrolnym C

Próby wątrobowe wynik pozytywny:

Wynik pozytywny testu oznacza, że jeden lub dwa poziomy transaminaz (ALT, AST) są wyższe niż przyjęta norma (80 IU/L). Na wyniku badania widoczna jest jedna lub dwie czerwone linie w polu testowym T oraz jedna niebieska linia w polu kontrolnym C. W tym wypadku należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie

Umieść zawartość pudełka na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, a następnie:

1. Dokładnie umyj ręce mydłem, opłucz pod bieżącą czystą wodą i osusz.
2. Rozerwij aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi, a następnie wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę.
3. Przygotuj nakłuwacz. Odkręć, wyciągnij i wyrzuć szarą nakrętkę, nie dotykając przycisku uwalniającego.
4. Zdezynfekuj opuszek wybranego palca dłoni i pomasuj go, aby zwiększyć ukrwienie.
5. Dociśnij mocno nakłuwacz do zdezynfekowanego opuszka palca i naciśnij przycisk wysuwający lancet.
6. Delikatnie masuj nakłuty opuszek palca, aby uzyskać krople krwi.
7. Nie uciskając pipety, zbliż jej końcówkę do kropli krwi. Krew migruje przez kapilarę aż do linii wyznaczonej na pipecie. Za pomocą masażu możesz uzyskać kolejną kroplę krwi, jeżeli linia na pipecie nie została osiągnięta. Należy unikać wciągania do pipety pęcherzyków powietrza.
8. Przenieś pobraną krew do dołka próbkowego płytki testowej poprzez ściśnięcie końcówki pipety.
9. Poczekaj 30-40 sekund, aż cała krew znajdzie się w dołku próbkowym.
10. Odkręć niebieską nakrętkę i dodaj 4 krople diluentu do dołka próbkowego. Trzymaj diluent pionowo.
11. Odczytaj wynik po 10 minutach. Wynik jest niewiarygodny, jeśli odczytujemy go po 15 minutach.

Dystrybutor:

ZBADAJSIE SP. Z O. O.
ul. Norwida 1/2
48-300 Nysa

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

