

Nursicare® Opatrunki na poranione i bolące brodawki sutkowe



cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Opakowanie	zestaw 6 sztuk opatrunków
Postać	opatrunek
Producent	Support Pharma
Wysyłka	1-2 dni
Zastosowanie	poranione i bolące brodawki sutkowe

Opis produktu

Nursicare - ulga na bolące i pogryzione sutki podczas karmienia piersią

Nursicare® to przełomowy produkt w leczeniu ran brodawek piersiowych oraz w zapobieganiu ich powstawaniu.

Preparat pochodzi z serii PolyMem® i jest produktem uznanym na całym świecie ze swoich właściwości w leczeniu zranionych brodawek.

Opatrunki na brodawki Nursicare to produkt pozwalający na skuteczną walkę z bólem i podrażnieniami brodawek sutkowych. Zapewniają idealne środowisko gojenia, a także oczyszczają i nawilżają ranę. Opatrunki na brodawki są idealne podczas karmienia piersią, które staje się mniej bolesne. Dodatkowo stanowią ochronę przed bolesnym ocieraniem się brodawek o biustonosz, aby gojenie przebiegało jak najszybciej.

Opakowanie

6 opatrunków (pełna kuracja dla dwóch brodawek)

Opatrunki na brodawki - zastosowanie

- poranione brodawki

- ropień piersi
- podczas nadwrażliwości brodawek
- krwawiące brodawki
- pogryzione brodawki
- popękane brodawki

Jak stosować opatrunki Nursicare

Dla optymalnej efektywności opatrunków specjaliści zalecają przed karmieniem oczyścić brodawkę sutkową. W tym celu wystarczy delikatnie przetrzeć ją wilgotną chusteczką.

Nursicare® zawiera wszystkie niezbędne składniki potrzebne do szybkiego i skutecznego leczenia rany. Nie należy zatem stosować równolegle innych preparatów na podobne zastosowania. Nie smarować sutka czy też opatrunku żadnymi maściami, kremami itp. ponieważ mogą one hamować działanie Nursicare®.

Kiedy należy zmienić opatrunek? Opatrunek można stosować na jedną pierś wielokrotnie, aż do momentu, gdy widoczny na zadrukowanej stronie Nursicare®, mokry ślad dosięgnie skraju opatrunku. Taki opatrunek należy zmienić. Opatrunki Nursicare w przeciwieństwie do maści na bazie lanoliny nie zatykają porów, a także nie przebijają się przez ubranie, dając nieestetyczne plamy. Opatrunki na brodawki sprawiają, że karmienie piersią staje się mniej bolesne, a procesy gojenia przebiegają znacznie szybciej.

Opatrunek Nursicare nie jest przyklejany do skóry, więc jego zmiana jest całkowicie bezbolesna.

Łatwość wymiany i komfort noszenia:

Opatrunek nie pozostawia skóry tłustej i lepkiej z racji braku zastosowania lanoliny. Zmiana opatrunku trwa natomiast tyle co wymiana wkładki laktacyjnej i nie wymaga przemywania całej piersi przed karmieniem. Opatrunek chroni sutki przed bolesnym ocieraniem o biustonosz.

Najwyższej jakości wykonanie:

Opatrunek Nursicare® jest wykonany z miękkiej i elastycznej pianki poliuretanowej która dopasowuje się do anatomicznej budowy piersi. Poprzez stałe przyleganie do brodawek.



Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

Support Pharma sp. z o.o.
ul. Korczaka 6b
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska

Galeria

