

Paski do pomiaru krzepliwości krwi INR/PT MISSION 48 sztuk

cena: 799,00 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	ACON
Wysyłka	1-2 dni
Zastosowanie	paski do pomiaru krzepliwości krwi INR/ PT

Opis produktu

Paski testowe PT/INR

Paski testowe Mission® PT/INR są przeznaczone do użytku z systemem monitorowania Mission® PT/INR w celu sprawdzania czasu krzepnięcia krwi u pacjentów poddanych terapii antykoagulacyjnej opartej o pochodne kumaryny (np. warfaryna). Paski testowe Mission® PT/INR wykorzystują próbki świeżej krwi kapilarnej lub pełnej krwi żyłnej wolnej od antykoagulantów. Wyniki podano zarówno w jednostkach czasu protrombinowego, jak i INR.

Wyrób przeznaczony do samokontroli oraz do użytku profesjonalnego.

!!Opakowanie zawiera:

Paski PT/INR 48 szt.(zapakowane w oddzielnych kopertkach)
1 chip

Instrukcje używania pasków

Zasada działania:

Paski testowe Mission® PT/INR, przy stosowaniu z aparatem Mission® PT/INR, dokładnie i rzetelnie mierzą czas protrombinowy (PT) oraz wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) w próbkach świeżej krwi kapilarnej pobranej z opuszka palca

lub świeżej pełnej krwi żyłnej nie zawierającej antykoagulantu. Po włożeniu paska testowego do aparatu próbka krwi jest nanoszona na specjalny obszar zaznaczony na pasku testowym. Aparat wykrywa obecność próbki na pasku i inicjuje upływ czasu testowego. Membrana paska zawiera odczynniki potrzebne do rozpoczęcia reakcji krzepnięcia. Czas od początkowego wykrycia próbki do pojawienia się odpowiedzi na sygnał fluorescencyjny jest wykorzystywany do obliczania czasu protrombinowego oraz wartości INR podanej próbki krwi.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.