

PROFESJONALNA SZCZOTKA DO MASAŻU



cena: 159,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	P. Jentschura
Wysyłka	do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu

Dzięki regulowanym paskom na rzep szczotka do masażu doskonale trzyma się w dłoni. Pokryta jest średnio twardym włosiem Chunking.

Zalety szczotek P. Jentschury:

- korpus szczotki z buku lub drewna bukowego warstwowego,
- długie, mocne i dobre jakościowo szczotki naturalne,
- długa wytrzymałość przy właściwym użytkowaniu,
- gęste, równomierne umocowanie włosa na szczotce,
- miękkie i delikatne oczyszczenie skóry,
- poprawione ukrwienie skóry.

Ważne wskazówki dotyczące pielęgnacji szczotek:

Szczotki są stworzone z nawoskowanego buku lub drewna bukowego warstwowego. Włosie szczotek jest wyrobione z wysokowartościowej szczeciny dzika. Szczotka do twarzy zawiera włosie z grzywy końskiej, szczotka energetyczna włosie z brązu i włosie końskie. Otrzymujecie Państwo produkty naturalne pierwszej klasy. Szczotki z drewna warstwowego nadają się w przeciwieństwie do drewna masywnego lepiej do szczotkowania na mokro, podczas kąpieli zasadowej, ponieważ drewno nie zmienia tak mocno koloru. Proszę jednak pamiętać, że produkt naturalny z drewna może się zafarbować w wodzie.

Uwagi dotyczące szczotkowania na mokro:

- Szczotki z drewna nie powinny znajdować się w wodzie przez cały okres kąpieli. W przypadku przerwy w szczotkowaniu, proszę odłożyć szczotkę na włosiu na krawędzi wanny.
- Po szczotkowaniu w zasadowej kąpieli, szczotka powinna być wypłukana pod czystą wodą, otrząśnięta i położona na włosiu na suchą chustę.
- Szczotki z drewna nie powinno się kłaść na kaloryfer lub poddawać działaniu suszarki. W przeciwnym wypadku drewno może ulec uszkodzeniu w postaci rys, które ostatecznie doprowadzą do wyłysienia szczotki.
- W razie potrzeby wypłukać włosie lekko ciepłą wodą z mydłem, unikając przy tym kontaktu z drewnem szczotki.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Import i dystrybucja w Polsce:

NaturapH Sp. z o.o.
ul. M. Laniewicza 62 A
43-400 Bielsko-Biała