

# Starpharma Iana Krople Do Oczu ze świetlikiem



cena: 9,07 PLN

## Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	IANA

## Opis produktu

### Iana świetlik krople do oczu rozświetlające i kojące 10 ml

Do stosowania z soczewkami kontaktowymi.

- rozświetlają oczy
- przywracają zmęczonym oczom naturalny blask
- łagodzą ból, podrażnienia i zmęczenie oczu
- zmniejszają uczucie swędzenia i pieczenia
- zrównoważone pH
- z wyciągami roślinnymi

Naturalnie rozświetlające i kojące krople do oczu, specjalnie opracowane z użyciem naturalnych ekstraktów roślinnych, pomagają przywrócić zmęczonym, matowym lub pozbawionym blasku oczom jaśniejszy wygląd i zmniejszyć podrażnienie, pieczenie, swędzenie i ból. Specjalnie opracowana receptura zawiera naturalne wyciągi ze świetlika i rumianku, roślin znanych ze swoich właściwości rozświetlających, łagodzących i kojących. Rozświetlające krople do oczu Iana nadają się idealnie do ukojenia zmęczonych, matowych i podrażnionych oczu, nadając im jednocześnie blask i świeżość. Idealnie do zastosowania przy porannej toalecie lub przed ważnym wydarzeniem bądź wieczornym wyjściem. Zrównoważone pH. Do stosowania z soczewkami kontaktowymi.

#### SKŁADNIKI:

Wyciąg z rumianku, wyciąg ze świetlika, biguanid, poliheksametylenowy (0,0001%), wersenian dwusodowy (0,12%), w zbuforowanym roztworze soli fizjologicznej.

**DZIAŁANIE:**

Rozświetlające i kojące krople do oczu łagodzą ból, podrażnienia i zapewniają komfort.

**SPOSÓB UŻYCIA:**

W zależności od potrzeby wkroplić jedna lub dwie krople do każdego oka, lub stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zamrugać kilka razy. Po użyciu mocno dokręcić nakrętkę. Zrównoważone pH. Krople odpowiednie do stosowania z soczewkami kontaktowymi.

**PRZECIWWSKAZANIA:**

Nie stosować w przypadku alergii na jakikolwiek składnik produktu. W przypadku wystąpienia dyskomfortu, podrażnienia, bólu, zaczerwienienia oczu lub nieostrego widzenia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Nie stosować, jeżeli przed pierwszym użyciem opaska zabezpieczająca jest uszkodzona. Przechowywać w temperaturze od 5C do 30C. Nie dotykać żadnej powierzchni końcówka zakraplacza, aby nie zanieczyścić roztworu. Nie stosować po upływie daty ważności. Produkt należy zużyć w ciągu 90 dni od jego otwarcia. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Nie sterylizuj.

**Ostrzeżenie**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.