

SUTRICON CC PASTRY SILIKON. N/BLIZNY 5X30CM*5SZT.

cena: 113,90 PLN



Opis słownikowy

| | |
|------------|----------------|
| Kategoria | Wyrób medyczny |
| Opakowanie | 5 sztuk |
| Postać | plaster |
| Producent | Verco S.A. |
| Wysyłka | 1-2 dni |

Opis produktu

Sutricon CC plastry to innowacyjne silikonowe plastry Sutricon CC z witaminą E przeznaczone do stosowania w leczeniu blizn po cesarskim cięciu.

Plastry silikonowe Sutricon CC skutecznie poprawiają wygląd i elastyczność blizn. Innowacyjna struktura plastra, zawierająca żel silikonowy, posiada właściwości zbliżone do zdrowej ludzkiej skóry: elastyczność, przepuszczalność tlenu i zapobieganie procesowi nadmiernej transepidermalnej utracie wody. Dzięki tym cechom plastry silikonowe na blizny redukują dyskomfort związany z blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia. Plastry silikonowe Sutricon CC zostały dodatkowo wzbogacone o witaminę E, która wspomaga działanie silikonu, co przekłada się na lepsze efekty terapii leczenia blizn w porównaniu do zastosowania samego silikonu. Witamina E stymuluje epitelializację, pozwala utrzymać odpowiednie nawilżenie naskórka oraz zdrowy wygląd skóry.

Czas terapii:

Ważną kwestią jest czas terapii, czyli jak długo należy stosować plastry Sutricon CC. Efekty można zaobserwować już po miesiącu, jednak pełna kuracja jest dłuższa i zależy od wielu czynników indywidualnych. Aby osiągnąć zadowalające efekty, należy stosować preparat regularnie i postępować zgodnie z instrukcją użytkowania. Długość terapii to średnio:

- min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych
- min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych

Przy skłonnościach do nieprawidłowego bliznowacenia, np. keloidów czy bliznowców zaleca się stosowanie plastrów Sutricon CC przez cały okres przebudowy blizny, nawet do 12 miesięcy.

Składniki:

Żel silikonowy z witaminą E, elastyczna membrana poliuretanowa

Sposób użycia:

Aby blizna była jak najmniej widoczna, ważna jest jej staranna pielęgnacja. Po całkowitym zagojeniu rany lub po zdjęciu szwów (kiedy zjedzą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można zastosować plastry silikonowe Sutricon. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.

Plaster silikonowy należy dociąć do wielkości blizny, z uwzględnieniem 5 mm marginesu z każdej strony.

W zależności od wielkości blizny, jedno opakowanie starcza na około 1-3 miesiące terapii. Przy bliznie o rozmiarach 0,5 x 14 cm z jednego, dużego opakowania można uzyskać 30 mniejszych plastrów. Stosując jeden plaster silikonowy przez 5 dni, opakowanie wystarczy na 150 dni terapii.

Aktywne działanie przez cały dzień. Plastry silikonowe na blizny Sutricon można nosić przez całą dobę. Jednak przynajmniej raz na dobę należy je zdjąć, bliznę umyć neutralnym mydłem, wysuszyć i nałożyć ten sam plaster ponownie.

Jeden plaster Sutricon można nosić do 5 dni, jeśli jest zachowany w czystości oraz utrzymuje właściwości adhezyjne. Uwaga! Plastra nie należy myć ani zaklejać dodatkowym opatrunkiem.

Jedno opakowanie wystarczy na 1-3 miesiące terapii, w zależności od wielkości i rodzaju blizny.

Zawartość opakowania:

5 plastrów silikonowych o rozmiarze 5 cm x 30 cm do indywidualnego dopasowania (przycięcia) do powierzchni blizny.

Rozmiar dostosowany do blizn po: cesarskim cięciu

Ważne informacje:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent:

Verco S.A.

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U

01-015 Warszawa

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.