


# TEST AMNIOCHECK, wykrywający wyciek wód płodowych, 5 testów

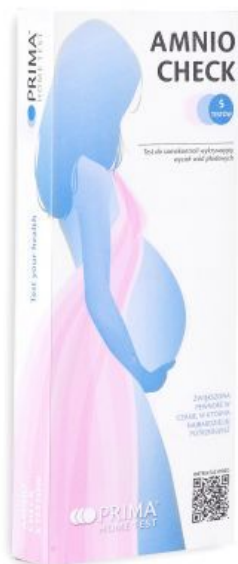

cena: 104,90 PLN

## Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	PRIMA LAB SA
Wysyłka	1-2 dni

## Opis produktu

### Wyrób AMNIOCHECK daje większą pewność w czasie, w którym najbardziej jej potrzebujesz.

Test AMNIOCHECK jest łatwym w użyciu zestawem domowym przeznaczonym do samodzielnego wykonywania badań in vitro, pozwalających wykryć prawdopodobny wyciek wód płodowych w przypadku, gdy Twój lekarz podejrzewa, iż możesz znajdować się w grupie podwyższonego ryzyka wycieku wód płodowych.

W przypadku wykonania amniopunkcji ryzyko wycieku wód płodowych w ciągu kolejnych 48 godzin będzie wyższe niż zwykle.

Dotyczy to również sytuacji związanych z wystąpieniem niezidentyfikowanej wilgoci oraz kobiet mających historię przedwczesnego przerwania błon płodowych.

Wyrób AMNIOCHECK zmieni swoją barwę w sytuacji, gdy wejdzie w kontakt z płynem, którego pH będzie wynosiło lub przekraczało 6,5 jednostki. Poziom pH wód płodowych przekracza 6,5 jednostki.

### Zasada działania:

Wystarczy przykleić wyrób AMNIOCHECK do bielizny i zająć się swoimi codziennymi sprawami. Gdy poczujesz, iż nastąpił wyciek płynu, sprawdź, czy żółta barwa wkładki uległa zmianie. **Zmiana barwy następuje w ciągu 15 minut od chwili wycieku płynu. W przypadku zmiany koloru na niebieski lub zielony, może to oznaczać, iż doszło do wycieku wód płodowych z macicy lub infekcji pochwy**

**Należy wtedy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala.** Jeśli wkładka pozostaje żółta lub zmieniła kolor na

żółty po upływie 15 minut, wyciekającym płynem będzie prawdopodobnie mocz, co podczas ciąży jest zjawiskiem powszechnym. Wszelkie minimalne wycieki wód płodowych, które mogą być wyczuwalne jako wilgoć, spowodują powstanie widocznej plamy w kolorze niebieskim lub zielonym.

**Wyrób AMNIOCHECK zalecany jest podczas wykonywania badań kontrolnych zarówno w przypadku kobiet ciężarnych znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka, jak i spoza tej grupy. Wyciekające wody płodowe zwiększają ryzyko infekcji zarówno dla matki jak i płodu, dlatego wczesne wykrycie może:**

- zapobiec powikłaniom lub przedwczesnemu porodowi
- pomóc w zidentyfikowaniu możliwego przerwania błon płodowych, zwłaszcza po amniopunkcji
- pomóc w potwierdzeniu odejścia wód płodowych, abyś mogła dotrzeć do szpitala na czas w celu bezpiecznego przeprowadzenia akcji porodowej

## Wskazania:

Wyrób przeznaczony jest do wykrywania wycieków wód płodowych oraz określania przyczyn wilgoci występującej podczas ciąży. W celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki, zgłoś się do swojego lekarza i przedstaw wyniki testu. Jeśli podejrzewasz u siebie infekcję pochwy, skonsultuj się z lekarzem.

## Warunki użytkowania

W celu uzyskania prawdziwych wyników, nie stosować wyrobu AMNIOCHECK, jeśli odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań będzie brzmiała **TAK**:

- 1) Czy od ostatniego stosunku seksualnego upłynęło mniej niż 12 godzin?
- 2) Czy od czasu ostatniej irygacji pochwy upłynęło mniej niż 12 godzin?

W przypadku odczytywania wyników związanych z krwawieniem, niezbędna może okazać się fachowa pomoc. Wszystkie sytuacje związane z krwawieniem należy zgłaszać lekarzowi.

W przypadku wilgoci, której przyczyną mógł być niedawno wzięty prysznic, kąpiel itp. nie należy brać pozytywnego wyniku za pewnik i należy przeprowadzić kolejny test.

W przypadku wystąpienia uczulenia lub podrażnienia skóry w obrębie części ciała stykających się z wyrobem, należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

## Wskazówki dotyczące użytkowania:

Woda kranowa może wpłynąć na wyniki testu – umyj i osusz ręce.

- 2) Rozpakuj wkładkę AMNIOCHECK. Wkładka ma wskaźnik w kolorze jasnożółtym.
- 3) Przyklej wkładkę do bielizny. Jasnożółty pasek wskaźnika powinien znajdować się bezpośrednio przy Twojej pochwie. Noś tę wkładkę tak jak nosisz zwykłą wkładkę do momentu, w którym poczujesz wilgoć (nie dłużej niż 12 godzin).  
Uwaga: korzystaj z wkładki podczas siedzenia, stania lub chodzenia. Nie korzystaj z wkładki w pozycji leżącej.
- 4) Gdy poczujesz wyciek płynu, zdejmij wkładkę i odczekaj 15 minut. Następnie sprawdź, czy żółty kolor wkładki uległ zmianie. Barwę kontroluj również podczas zmiany wkładki na nową.
- 5) Jeśli po upływie 15 minut poczujesz wilgoć, a wkładka będzie całkowicie żółta, rozważ przeprowadzenie kolejnego testu.
- 6) Wkładki usuwaj w taki sam sposób, jak pozostałe produkty higieniczne.

## Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Aby uniknąć zanieczyszczenia, do czasu użycia wyrób AMNIOCHECK przechowywać w postaci szczelnie zamkniętej. Prosimy zwrócić uwagę na datę ważności podaną na opakowaniu AMNIOCHECK. W razie wątpliwości należy skonsultować się z farmaceutą wydającym ten wyrób. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności lub w przypadku uszkodzenia saszetki.

## Ograniczenia dotyczące wyrobu:

Antybiotykoterapia lub infekcje pochwy (takie jak bakteryjne zapalenie pochwy lub rzęsistkowica pochwy) mogą skutkować podwyższonym pH pochwy, co z kolei może prowadzić do fałszywie dodatnich wyników związanych z możliwymi wyciekami wód płodowych. Możliwość występowania infekcji pochwy można ocenić za pomocą standardowych procedur diagnostycznych.

## Zawartość opakowania:

OPAKOWANIE AMNIOCHECK ZAWIERA:

5 wkładek testowych oraz instrukcję użytkowania.

Wyrób AMNIOCHECK należy przechowywać w postaci nierozpakowanej i użyć natychmiast po otwarciu.

## Producent:

PRIMA LAB SA  
Via Antonio Monti 7  
CH-6828 Balerna - SZWAJCARIA

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Galeria

