

# TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY kasetkowy Diather, 5 sztuk

cena: 12,50 PLN



## Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	1-2 dni

## Opis produktu

W połowie cyklu kobiety dochodzi do tzw. piku LH, który wyznacza największe stężenie hormonu luteinizującego. 24 do 36h po piku następuje owulacja. Wiedza na temat momentu, w którym następuje wzrost stężenia LH przydaje się parom starającym się o dziecko. To właśnie w tym momencie kobieta ma największą szansę na zajście w ciążę. Należy jednak pamiętać, że nie każdy cykl może być owulacyjny.

**TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY** jest szybkim testem płytkowym, służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 30 mIU/ml. Test wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety. Wykonanie badania jest proste, polega na dodaniu na płytkę testową 3 kropli moczu i odczytaniu w ciągu 3 minut wyniku badania.

### OPAKOWANIE ZAWIERA

- 5 saszetek z testem kasetkowym
- pipeta kapilarna
- instrukcja użycia

### ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

#### 1. JAK DZIAŁA TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY?

Za pomocą testu określany jest poziom hormonu luteinizującego (LH) w moczu. Poziom hormonu wzrasta tuż przed najbardziej płodnym dniem w cyklu miesięczkowym. Wzrost hormonu LH powoduje uwolnienie jednej z komórek jajowych z jajnika, co określa się mianem owulacji.

#### 2. KIEDY NALEŻY WYKONAĆ TEST?

Dla zwiększenia wiarygodności wyników każde badanie powinno się przeprowadzić mniej więcej o tej samej porze dnia. Przed pobraniem próbki moczu należy ograniczyć spożycie płynów na około 2 godziny.

**3. CZY MOŻNA STOSOWAĆ TEST, ABY UNIKNĄĆ CIĄŻY?**

Nie, nie można ponieważ test owulacyjny nie służy do celów antykoncepcyjnych.

**4. JAK CZUŁY JEST TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY?**

TEST wykrywa hormon luteinizujący (LH) o stężeniu 30 mIU/ml i powyżej.

**5. CZY ALKOHOL MA WPŁYW NA WYNIK TESTU?**

Nie. Stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej, karmienie piersią i ciąża mogą mieć wpływ na wynik testu owulacyjnego.

**6. DLACZEGO NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO BADANIA PIERWSZEGO MOCZU PORANNEGO?**

Nie zaleca się wykonywania badania z moczu porannego, który jest zagęszczony. Wpływa to na uzyskanie fałszywie dodatnich wyników.

**7. CZY ILOŚĆ SPOŻYTYCH PŁYNÓW, MOŻE MIEĆ WPŁYW NA WYNIK TESTU?**

Przyjmowanie dużej ilości płynów przed badaniem może spowodować rozcieńczenie moczu i w rezultacie być powodem wyniku fałszywie ujemnego. Z tego powodu sugeruje się, aby nie pić płynów 2 godziny przed wykonaniem badania.

**8. JAK DŁUGO UTRZYMUJĄ SIĘ BARWNE LINIE W POLU TESTOWYM?**

Wynik testu powinien być odczytany w czasie 5 minut. Wynik dodatni nie zanika, ale barwne linie i tło mogą ulec przyciemnieniu, również przy wyniku negatywnym może pojawić się druga linia, która po upływie kilku kolejnych minut nie ma znaczenia diagnostycznego. Zaleca się zapisać wynik testu odczytanego w 5 minucie.

**9. KIEDY NAJLEPIEJ ODBYĆ STOSUNEK PŁCIOWY PRZY DODATNIM WYNIKU TESTU?**

Dodatni wynik testu wskazuje, że owulacja pojawi się najprawdopodobniej w ciągu 24 - 36 godzin. Jest to najbardziej płodny okres, a zatem, aby zająć w ciążę, najlepiej jest mieć stosunek w tym czasie.

**10. CZY TEST JEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY MOŻE ZASTĄPIĆ TERMICZNĄ METODĘ OKREŚLANIA PŁODNOŚCI?**

Test owulacyjny nie może zastąpić termicznej metody określania płodności. Metoda termiczna wykazuje, że owulacja już wystąpiła, natomiast przy pomocy testu owulacyjnego uzyskuje się informację, kiedy ewentualnie owulacja wystąpi.

**11. JAKI JEST SCHEMT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DODATNIEGO WYNIKU TESTU OWULACYJNEGO, ODBYTEGO STOSUNKU PŁCIOWEGO DNI PŁODNYCH I BRAKU JESTEM W CIĄŻY?**

Istnieje wiele czynników, od których zależy stosunek płciowy zakończy się zapłodnieniem komórki jajowej. Przeciętnej, zdrowej parze zajmuje to zwykle kilka miesięcy, tak więc zaleca się monitoring dni płodnych przez 3-4 miesiące. Jeśli w tym czasie uda się zająć w ciążę, zaleca się wizytę lekarską.

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Podmiot odpowiedzialny:


DIATHER sp. z o.o sp.k.  
Twarda 1/14  
00-114 Warszawa

## Galeria

### Zawartość zestawu



### Schemat użycia

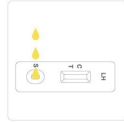

### Interpretacja wyników

