

TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY strumieniowy Diather, 5 sztuk

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	1-2 dni



Opis produktu

W połowie cyklu kobiety dochodzi do tzw. piku LH, który wyznacza największe stężenie hormonu luteinizującego. 24 do 36h po piku następuje owulacja. Wiedza na temat momentu, w którym następuje wzrost stężenia LH przydaje się parom starającym się o dziecko. To właśnie w tym momencie kobieta ma największą szansę na zajście w ciążę. Należy jednak pamiętać, że nie każdy cykl może być owulacyjny.

TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY jest szybkim testem strumieniowym, służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 30 mIU/ml. Test wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety. Wykonanie badania jest proste, polega na zanurzeniu testu w pojemniku z moczem lub umieszczeniu bezpośrednio pod strumieniem moczu na 15 sekund i odczytaniu w ciągu 3 minut wyniku badania.

OPAKOWANIE ZAWIERA

- 5 saszetek z testem strumieniowym
- instrukcja użycia

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

1. JAK DZIAŁA TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY?

Za pomocą testu określany jest poziom hormonu luteinizującego (LH) w moczu. Poziom hormonu wzrasta tuż przed najbardziej płodnym dniem w cyklu miesięczkowym. Wzrost hormonu LH powoduje uwolnienie jednej z komórek jajowych z jajnika, co określa się mianem owulacji.

2. KIEDY NALEŻY WYKONAĆ TEST?

Dla zwiększenia wiarygodności wyników każde badanie powinno się przeprowadzić mniej więcej o tej samej porze dnia. Przed pobraniem próbki moczu należy ograniczyć spożycie płynów na około 2 godziny.

3. CZY MOŻNA STOSOWAĆ TEST, ABY UNIKNĄĆ CIĄŻY?

Nie, nie można ponieważ test owulacyjny nie służy do celów antykoncepcyjnych.

4. JAK CZUŁY JEST TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY?

TEST wykrywa hormon luteinizujący (LH) o stężeniu 30 mIU/ml i powyżej.

5. CZY ALKOHOL MA WPŁYW NA WYNIK TESTU?

Nie. Stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej, karmienie piersią i ciąża mogą mieć wpływ na wynik testu owulacyjnego.

6. DLACZEGO NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO BADANIA PIERWSZEGO MOCZU PORANNEGO?

Nie zaleca się wykonywania badania z moczu porannego, który jest zagęszczony. Wpływa to na uzyskanie fałszywie dodatnich wyników.

7. CZY ILOŚĆ SPOŻYTYCH PŁYNÓW, MOŻE MIEĆ WPŁYW NA WYNIK TESTU?

Przyjmowanie dużej ilości płynów przed badaniem może spowodować rozcieńczenie moczu i w rezultacie być powodem wyniku fałszywie ujemnego. Z tego powodu sugeruje się, aby nie pić płynów 2 godziny przed wykonaniem badania.

8. JAK DŁUGO UTRZYMUJĄ SIĘ BARWNE LINIE W POLU TESTOWYM?

Wynik testu powinien być odczytany w czasie 5 minut. Wynik dodatni nie zanika, ale barwne linie i tło mogą ulec przyciemnieniu, również przy wyniku negatywnym może pojawić się druga linia, która po upływie kilku kolejnych minut nie ma znaczenia diagnostycznego. Zaleca się zapisać wynik testu odczytanego w 5 minucie.

9. KIEDY NAJLEPIEJ ODBYĆ STOSUNEK PŁCIOWY PRZY DODATNIM WYNIKU TESTU?

Dodatni wynik testu wskazuje, że owulacja pojawi się najprawdopodobniej w ciągu 24 - 36 godzin. Jest to najbardziej płodny okres, a zatem, aby zająć w ciążę, najlepiej jest mieć stosunek w tym czasie.

10. CZY TEST JEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY MOŻE ZASTĄPIĆ TERMICZNĄ METODĘ OKREŚLANIA PŁODNOŚCI?

Test owulacyjny nie może zastąpić termicznej metody określania płodności. Metoda termiczna wykazuje, że owulacja już wystąpiła, natomiast przy pomocy testu owulacyjnego uzyskuje się informację, kiedy ewentualnie owulacja wystąpi.

11. JAKI JEST SCHEMT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DODATNIEGO WYNIKU TESTU OWULACYJNEGO, ODBYTEGO STOSUNKU PŁCIOWEGO DNI PŁODNYCH I BRAKU MENSTRUACJI?

Istnieje wiele czynników, od których zależy stosunek płciowy zakończy się zapłodnieniem komórki jajowej. Przeciętnej, zdrowej parze zajmuje to zwykle kilka miesięcy, tak więc zaleca się monitoring dni płodnych przez 3-4 miesiące. Jeśli w tym czasie uda się zająć w ciążę, zaleca się wizytę lekarską.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

DIATHER sp. z o.o sp.k.
Twarda 1/14
00-114 Warszawa

Galeria

Zawartość zestawu



Interpretacja wyników

Pozytywny



Negatywny



Nieprawidłowy



Schemat użycia

